

## ИНОВАТИВНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ

### Incidin™ OxyWipe S

**СПОРОЦИДНИ (C. DIFFICILE),  
ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА, ПОЧИСТВАЩИ И  
ДЕЗИНФЕКЦИРАЩИ КЪРПИЧКИ С ВОДОРОДЕН  
ПЕРОКСИД, ОСИГУРЯВАЩ БЪРЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ  
(HI-SPEED H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>™)**

Иновативните кърпички Incidin™ OxyWipe S предлагат предимствата на патентована\* формула, съдържаща водороден пероксид с широк спектър на действие.

Те са ефикасни срещу широк спектър от патогени като не оставят следи от активната съставка, благодарение на високата скорост на изпарение.

Incidin™ OxyWipe S осигуряват:

- Hi-speed H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>™
- Активното вещество се разгражда до вода и кислород
- Спороциден (C. difficile) & вирусоциден ефект
- Отлична съвместимост с материалите
- Потвърдена ефикасност за течността, отделяща се от кърпичките

\*Европейски патент EP1987121



# Incidin™ OxyWipe S

Спороцидни (C. difficile), готови за употреба, почистващи и дезинфекциращи кърпички с Водороден пероксид, осигуряващ бърза дезинфекция (Hi-speed H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>™)

## ЕФИКАСНИ

- Широк спектър на действие
- Кратки експозиционни времена

## БЕЗОПАСНИ

- Активното вещество се разгражда до вода и кислород
- Отлична съвместимост с материалите

## ЛЕСНИ ЗА УПОТРЕБА

- Почистват & дезинфекцират в една стъпка
- Готови за употреба в удобна разфасовка

## МИКРОБИОЛОГИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯ

ЕФИКАСНОСТ - НЕРАЗРЕДЕНИ	ВРЕМЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Дезинфекция на повърхности съгл. VAN метод 2015 (вкл. EN 16615), мръсни условия	
Бактерициден, дрождециден	15 мин.
Фунгициден	30 мин.
Микобактерициден	30 мин.
Фаза 2/Етап 2 - 4 полеви тест (изпитвания в условия, близки до практиката)	
EN 16615 (бактерициден)	2 мин.**
EN 16615 (дрождециден)	1 мин.**
EN 16615 метод (фунгициден)	5 мин.**
EN 16615 метод (туберкулоциден и микобактерициден)	5 мин.**
EN 16615 метод съгл. CEN TC216 prWI Oct 2020/ съгл. VAN метод 19 (C. difficile)	15 мин.*
Фаза 2/Етап 1 - суспензионни тестове	
EN 13727 (бактерициден)	2 мин.
EN 13624 (дрождециден)	15 мин.
EN 13624 (фунгициден)	30 мин.
EN 14348 (туберкулоциден и микобактерициден)	30 мин.
EN 14476 (активност спрямо вируси с обвивка)	30 сек.
EN 14476 (ограничена вирусцидност)	15 мин.
EN 14476 Adeno	30 сек.
EN 14476 Noro	15 мин.
EN 14476 вирусциден	30 мин.*
EN 17126 (C. difficile)	60 мин.
Тестван съгл. DVV 2015	
Активност спрямо вируси с обвивка съгл. становище на RKI 01/2004	30 сек.
Ограничена вирусцидност & Norovirus (MNV)	60 мин.
Adeno	1 мин.
Polyoma SV40	30 сек.
RoTa	15 сек.

\* чисти условия \*\* мръсни условия

## ОПАКОВКА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

ПРОДУКТ	РАЗФАСОВКА	АРТИКУЛЕН НОМЕР
Incidin™ OxyWipe S	6 x 100 кърпички (20 x 20 cm)	3082260

## ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



Бързо действащи, спороцидни (C. difficile), готови за употреба, почистващи и дезинфекциращи кърпички за повърхности на медицински изделия

- съгл. Директива 93 / 42 / ЕЕС: за медицинските изделия

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Изважда се една отделна кърпичка. Повърхността се избърсва старателно като се осигурява цялостното ѝ омокряне. Остава се да изсъхне и не се изплаква. След употреба капакът на кутията се затваря.

Ползването на почистващи и дезинфекциращи кърпички не замества редовното почистване.

Да не се прилага върху повърхности, чувствителни към оксидиращи агенти като например мрамор, мед или месинг. При обработка на медицински инструменти винаги спазвайте инструкциите за употреба на производителя, вкл. отчитайте съвместимостта с материалите. Крайна дезинфекция на полукритични медицински изделия (напр. сонди § ТЕЕ сонди): ако потапяне не е възможно, дезинфекцирайте изделието чрез забърсване според описанието по-горе. В този случай, изплакнете обилно с питейна вода след изтичане на времето на въздействие.

## СЪСТАВ

100g съдържат следната активна съставка: 1,5g Водороден пероксид.

## УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът трябва да се съхранява в оригиналната си опаковка при температура между 5°C и 25°C в студени, сухи помещения далеч от пряка слънчева светлина.

Срок на годност след първото отваряне: 3 месеца.

## ИЗПОЛЗВАЙТЕ С ВНИМАНИЕ МЕДИЦИНСКОТО ИЗДЕЛИЕ

Винаги четете етикета и информацията за продукта.



САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

## ЕКОЛАБ ЕООД

бул. Цариградско шосе 115 А  
1784 София, България  
+359 2 976 80 20  
bg-bg.ecolab.com



## ECOLAB EUROPE

Richtstrasse 7  
8304 Wallisellen  
Switzerland

