



## МОЩНО ПОЧИСТВАЩО ДЕЙСТВИЕ ЕФИКАСНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

### Sekusept™ Pulver CLASSIC

#### РЪЧНО ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Sekusept Pulver Classic е бързодействащ прахообразен дезинфектант за медицински инструменти.

Sekusept Pulver Classic осигурява:

- Силно действаща формула
- Ефикасна дезинфекция на инструменти (медицински изделия)



# Sekusept™ Pulver CLASSIC

Ръчно почистване и дезинфекция на медицински инструменти

## СЪВМЕСТИМОСТ С МАТЕРИАЛИТЕ

Sekusept Pulver Classic е идеален за почистване и дезинфекция на набор от медицински инструменти, изработени от метал и еластомери, както и от поликарбонати, плексиглас (PMMA) и полисулфон.

## ПОЧИСТВАЩО ДЕЙСТВИЕ



На включените в състава на Sekusept Pulver Classic компоненти се дължи отличното му почистващо действие, постигнато при кратки експозиционни времена и ниски работни концентрации.

## ДЕЗИНФЕКЦИРАЩО ДЕЙСТВИЕ

Sekusept Pulver Classic е бил подложен на комплексни изпитвания и оценки - микробиологични, вирусологични, токсикологични и екологични. Продуктът демонстрира висока степен на ефикасност срещу широк спектър от вируси и бактерии, както можете да видите в таблицата по-долу.

## ДОЗИРАНЕ

РАБОТЕН РАЗТВОР	КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР					
	1%		2%		4%	
	gr	ml	gr	ml	gr	ml
1 Литър	10	12.5	20	25	40	50
2 Литра	20	25	40	50	80	100
4 Литра	40	50	80	100	160	200
8 Литра	80	100	160	200	320	400
10 Литра	100	125	200	250	400	500
20 Литра	200	250	400	500	800	1000
20 Литра	300	375	600	750	1200	1500

1ml = 0.8 g  1 мерителна лъжица = 20g прах = 25ml  1 мерителна чаша = 160g прах = 200ml

## МИКРОБИОЛОГИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТОВЕ

ЕФЕКТ/УСЛОВИЯ	КОНЦЕНТРАЦИЯ	ЕКСПОЗИЦИЯ В МИН.
Бактерициден	4,0%	15 min
Съгласно EN 13727 и EN 14561, мръсни условия	2,0%	60 min
Дрождециден	4,0%	15 min
Съгласно EN 13624 и EN 14562, мръсни условия	2,0%	60 min
Ефикасен срещу вируси с обвивка съгл. DVV2008 / EN 17111	2%	15 min
Вирусоциден съгл. DVV2008 / EN 17111	2%	120 min
Adeno - вирус съгл. DVV2008 / EN 17111	2%	15 min
Rota - вирус съгл. становището на RKI 01/2004*	1%	60 min
SV40. Съгл. становището на RKI 01/2004*	2%	5 min
Дезинфекция на инструменти		
Съгл. VAN (бактерициден и дрождециден)	4,0%	15 min
Чисти & мръсни условия	2,0%	60 min

\*DVV 2008

## ОПАКОВКА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

ПРОДУКТ	РАЗФАСОВКА	АРТИКУЛЕН НОМЕР
Sekusept Pulver Classic кофа с мерителна лъжица	4 x 2 kg	3049500
Sekusept Pulver Classic кофа с мерителна чаша	10 kg	3049540

## ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За ръчно почистване и дезинфекция на медицински изделия. Продуктът е неподходящ за гъвкави ендоскопи или алуминиеви инструменти, както и за инструменти с нарушена цялост на хроменото или никелово покритие.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

За приготвяне на работния разтвор да се използва прилежащата мерителна лъжица/ мерителна чаша. Добавете необходимото количество прахообразен препарат във водата като разбърквате неколккратно в рамките на 15 минути.

Потопете инструментите, като се уверите, че повърхностите им са изцяло покрити от разтвора. Почиствайте инструментите в съответствие с инструкциите на производителя, включително като прилагате механично действие (напр. изчеткване, избърсване) до постигане на видимо чисти повърхности.

Извадете инструментите от разтвора след изтичане на препоръчаното време на експозиция и ги изплакнете с вода, минимум с питейни качества. Следва подсушаване на външните повърхности и вътрешните канали (напр. на ендоскопите).

За провеждане на крайна дезинфекция, моля извършвайте подходящата обработка. Ежедневно трябва да се приготвя свеж работен разтвор. В случай на видимо замърсяване, пригответе незабавно нов работен разтвор.

## СЪСТАВ

Натриев перкарбонат, фосфат, нейногенни повърхностноактивни вещества. Активното вещество пероцетна киселина се образува при приготвяне на работния разтвор.

## СЪХРАНЕНИЕ

Опасно. Спазвайте препоръките за безопасност (изготвени съгласно действащите Европейски правила за класифициране и етикетиране на химическите продукти). Съхранение: при температура между +5°C и +25°C.

## СЕРТИФИКАТИ

Медицинско изделие. Пълното антимикробно действие на Sekusept Pulver Classic е описано в техническото досие, достъпно при поискване.

## ПОЛЗВАЙТЕ МЕДИЦИНСКОТО ИЗДЕЛИЕ БЕЗОПАСНО

Винаги четете етикета и информацията за продукта.



САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

### ЕКОЛАБ ЕООД

бул. Цариградско шосе 115 А  
1784 София, България  
+359 (2) 976 80 20  
bg-bg.ecolab.com



### ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Germany



bg-bg.ecolab.com